


**DR**  
HEALTH  
CARE | **12 YEARS** RESEARCHING  
DEVELOPING  
INNOVATING  
IN DAO DEFICIENCY

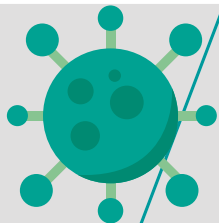

# MASCARILLA 3 CAPAS

3 CAPAS DE 100% TNT (Tejido No Tejido) CON CONTORNO DE SEGURIDAD


10 Uds  
PACK



TALLA ADULTO

Esta mascarilla cumple con la normativa de fabricación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría General de industria y de la pequeña y mediana empresa, como MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE, y presenta una capacidad de filtración de carga bacteriana equivalente a una mascarilla de categoría FFP2.

Distribuido por:  
DR HEALTHCARE  
C/ Escoltes Pies, 49  
08017 Barcelona (España)  
Tel: +34 935 533 692

 [ventas@dr-healthcare.com](mailto:ventas@dr-healthcare.com)

[www.dr-healthcare.com](http://www.dr-healthcare.com)



# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE USO

Esta mascarilla higiénica reutilizable cumple con la *Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso*. Estas mascarillas son de uso personal.

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE /2016/425.

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

## PROCESO DE COLOCACIÓN DE LAS MASCARILLAS E INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Colocación de la mascarilla

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:



1. Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



2. Identificar la parte superior de la mascarilla que se distingue por tener el pliegue hacia abajo.



3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.



4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.



5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.



6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.



7. Verificar que está colocada correctamente. Comprobando el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.



8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocar la mascarilla, antes debe lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

## 2. Retirada de la mascarilla

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
4. Lavar la mascarilla o desecharla en un recipiente específico.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.

## 3. Lavado y secado de la mascarilla

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60 °C. La mascarilla aguanta 5 ciclos de lavado y secado manteniendo sus prestaciones. Una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar.

Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.

No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

La mascarilla debe secarse al aire completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar.

## 4. Desecho de mascarillas

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico, preferiblemente con tapa y control no manual. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

## 5. Duración de uso máximo recomendado

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 8 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.

Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.








# MASCARILLA 3 CAPAS

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE DE PROTECCIÓN BIDIRECCIONAL

DR  
HEALTH  
CARE

12 YEARS  
IN DAO DEFICIENCY

RESEARCHING  
DEVELOPING  
INNOVATING

Tipo de mascarilla	Protege al que la lleva 	Protege a los demás 	Lavable y Reutilizable  60°C x 5
Higiénica Reutilizable y Bidireccional 			
Capacidad de filtrado	Equivalente a una mascarilla FFP2 (≥ 90% de eficacia de filtración mínima)		
Respirabilidad	< 60 Pa / cm <sup>2</sup>		

## FICHA TÉCNICA

• MATERIAL	TNT Tejido No Tejido.
• 3 CAPAS	Capa 1 de color 50gr. TNT Capa 2 de color blanco 30gr. TNT Capa 3 de color blanco 30gr. TNT.
• BIES 20mm	Contorno de Seguridad TNT.
• MEDIDAS	Alto 105mm x Ancho 180mm.
• SUJECIÓN	Goma elástica 17mm por lateral.
• PRESENTACIÓN	Bolsas 140x260mm de 10 Uds.
• FABRICACIÓN	Taller de confección textil industrial.

## CONSEJOS PARA SU SALUD

Cómo hacer frente a COVID-19

### CONTAGIO



OBJETOS  
CONTAMINADOS



CONTACTO  
HUMANO

### PROTÉJASE



LLEVE  
MASCARILLA



HIGIENE  
DE MANOS



USE PAÑUELOS  
DE UN SOLO USO